



# Laboratorios **DAI** c.a.

*Innovando en Productos de Salud*



**DiaSpect**  
We see through



BANCO DE  
**SANGRE**

[www.labdai.com](http://www.labdai.com)

# The Diaspect Hemoglobin T System

**Resultados instantáneos.** ✓

Aparece en **1-2 segundos.**

**Rentable.** ✓

Cubetas **sin reactivo** y **sin Refrigeración.**

**Exacta.** ✓

Fotómetro de **amplio espectro.**

**Fiable.** ✓

Los consumibles **no se afectan** por temperatura ni humedad.



1



Seleccione el dedo que se usará para el muestreo y masajéelo suavemente para mejorar la circulación. Desinfecte el punto de punción y permita que seque. Haga la punción en la punta del dedo usando una lanceta apropiada, para garantizar un mejor flujo sanguíneo

---

2



Elimine la primera gota de sangre con un algodón, para deshacerse del líquido tisular, y tener un buen flujo sanguíneo. La gota de sangre debe ser suficientemente grande para llenar la cubeta completamente.

---


3



Coloque el borde de la cubeta en medio de la gota de sangre y permita que se llene, evitando posibles burbujas de aire.

---

4

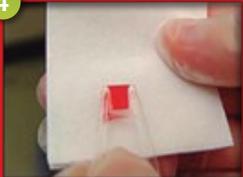

Retire con un paño seco cuidadosamente toda la sangre en exceso del exterior de la cubeta, asegurándose de no tocar el borde de la cubeta, ya que puede sacar sangre de la cavidad.

---

5



Coloque la cubeta en el soporte y toque. El resultado se mostrará en 1-2 segundos.

---

6



Tome nota de los resultados (la descarga automática de los resultados puede ser realizado si la interfaz adecuada está disponible).



E-mail: [labdai@labdai.com](mailto:labdai@labdai.com) • [sventas@labdai.com](mailto:sventas@labdai.com)

Tel: **+58 212-945-0200** • Fax: **+58 212-945-7964**

Calle Bolívar, Edf. Frangiu. PB, La Trinidad  
Caracas 1080, Venezuela. [www.labdai.com](http://www.labdai.com)